



规格：375*105mm(平铺) 75*105mm(折后)
工艺：双面印刷/风琴折

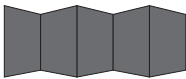

P/N:110401110816X


用户手册

ET30A/ET30B 红外测温仪

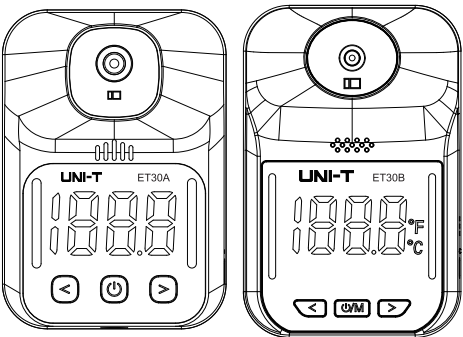

使用前请仔细阅读说明书

介绍

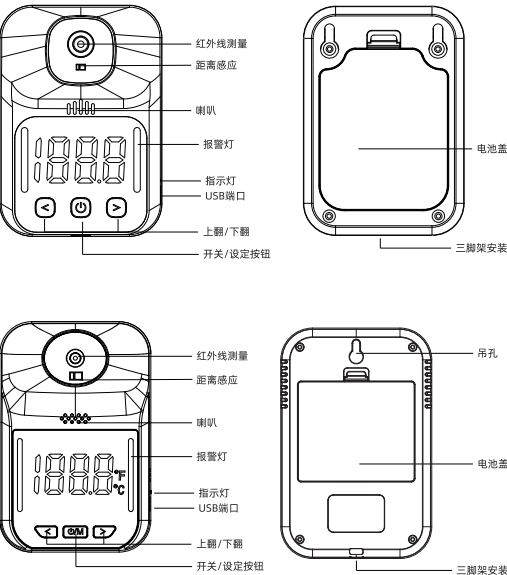

参数表


型号	ET30A	ET30B
精度	±0.2°C (放置在工作环境30分钟后测量)	
报警功能	异常自动报警, 闪光+声音报警约5秒	
测量距离	1cm-10cm自动测量	
环境温度	0°C-50°C (推荐15°C-35°C)	
测量范围	32°C-42°C (体表测量模式)	
响应时间	0.5s	
数据存储	支持118组测量数据存储、回看及清除	
显示	数字显示	
接口	Micro USB	
电源	USB供电\锂电池供电\3节5号干电池供电	
安装方法	三脚架固定, 挂孔安装	
语言	4种中文语音播报	16种语言播报
尺寸	107mm×75mm×80.5mm	145mm×95mm×110mm

4, 退出菜单设定方法:

- (1) 设置完成后长按开关/设置按钮退出;
- (2) 无操作10秒后自动退出。

5, 温度测量:


距离传感器 1-10cm, 以测量温度。

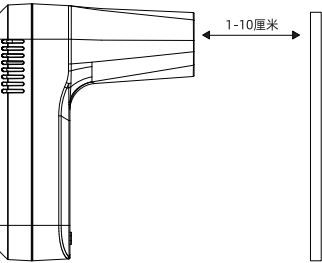

菜单设定


1, 语言设置:

ET30A: CH/CH1/CH2/CH3:中文
ET30B: EN:英语 It:意大利语 Hr:韩语 SP:西班牙语 JP/JP1:日语
Ut:越南语 Cb:柬埔寨语 mL:马来语 rt:印尼语 Ar:阿拉伯语
tL:泰语 PL:波兰语 dt:蜂鸣器音效“滴” CH/CH1/CH2/CH3:中文

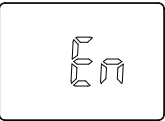


2, 温度单位设置:

短按菜单键2次, 进入温度单位设定, 左右键切换摄氏度和华氏度。
注:ET30A没有单位切换功能

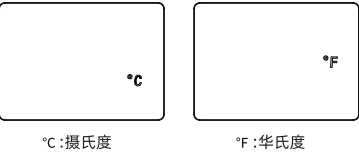

3, 音量设置:

短按菜单键3次 (ET30A只需按2次), 进入音量大小设定默认V0
左右键调节音量大小, 从V00——V05 V00无声 V05最大

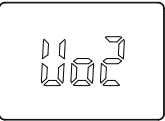


4, 模式设置:

短按菜单4次 (ET30A只需按3次), 进入测量模式设定,
左右键切换测量模式




5, 报警温度设置:

短按菜单键5次 (ET30A只需按4次), 进入报警温度设定
左右键可在报警温度36.0-38.0之间切换, 默认为37.5°C
温度警报仅在体表模式下有效。

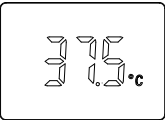


6, 自动关机设置:

短按菜单键6次 (ET30A只需按5次), 左右键切换是否12小时自动关机, 默认12小时自动关机

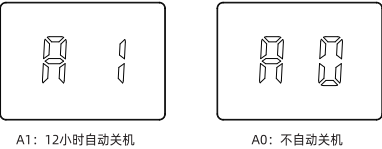

7, 超低温设置:


短按菜单键7次 (ET30A只需按6次), 左右键切换nor/Lo 默认nor。

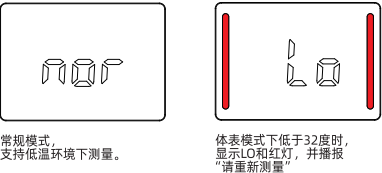

参数表


型号	ET30A	ET30B
精度	±0.2℃（放置在工作环境30分钟后测量）	
报警功能	异常自动报警，闪光+声音报警约5秒	
测量距离	1cm-10cm自动测量	
环境温度	0℃-50℃（推荐15℃-35℃）	
测量范围	32℃-42℃（体表测量模式）	
响应时间	0.5s	
数据存储	支持118组测量数据存储、回看及清除	
显示	数字显示	
接口	Micro USB	
电源	USB供电\锂电池供电\3节5号干电池供电	
安装方法	三脚架固定，挂孔安装	
语言	4种中文语音播报	16种语言播报
尺寸	107mm×75mm×80.5mm	145mm×95mm×110mm

状态说明

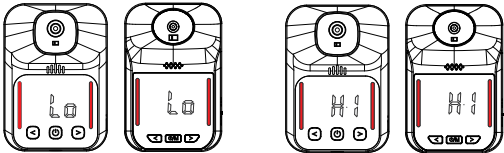

'Lo':
温度低于32℃
两侧红灯闪烁并播报“请重新测量”

'HI':
温度高于42℃
两侧红灯闪烁并播报“请重新测量”

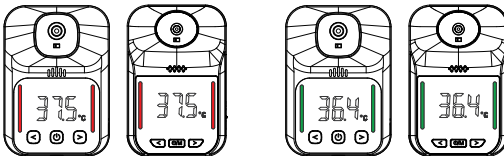


温度异常：两侧红灯连续闪烁，
并带有警音提示

常温：两侧绿灯闪烁并播报“温度正常”


操作指令

1，开关及复位：
按下开关按钮，机器启动成功；
长按2秒开关按钮，关机成功；
长按开关按钮9秒直到显示“37.5℃”此时恢复到默认37.5℃报警及LO模式。


2，历史温度查询：
左右键查看历史温度数据，最多支持118组回看。
先显示回看温度序号，再显示对应序号的温度。

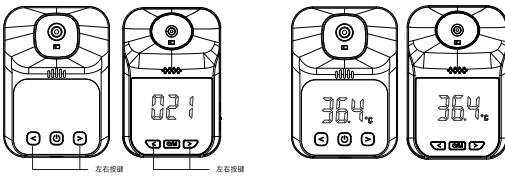


3，历史数据清零：
历史温度查看后，长按左键或者右键2秒，此时屏幕显示“CLr”，待屏幕中间显示3横杠时，说明温度数据清除完成，可短按开关/设定按钮或等待10秒自动退出。

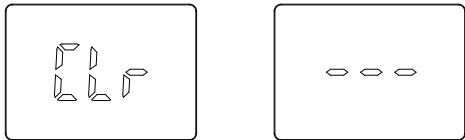


5，报警温度设置：
短按菜单键5次（ET30A只需按4次），进入报警温度设定
左右键可在报警温度36.0~38.0之间切换，默认为37.5℃
温度置数仅在体表模式下有效。

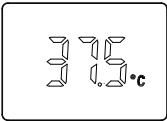

6，自动关机设置：
短按菜单键6次（ET30A只需按5次），左右键切换是否12小时自动关机，默认12小时自动关机

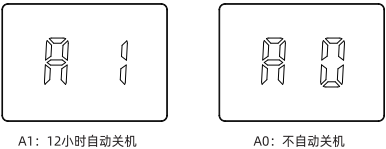


7，超低温设置：
短按菜单键7次（ET30A只需按6次），左右键切换nor/Lo默认nor。

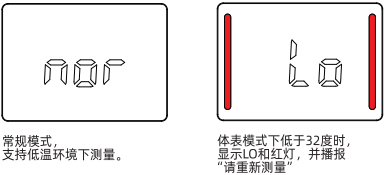

常规模式，
支持低温环境下测量。

体表模式下低于32度时，
显示LO和红灯，并播报
“请重新测量”

8，音效设置：
短按菜单键8次（ET30A只需按7次），左右切换语音播报前音效D1/D0。

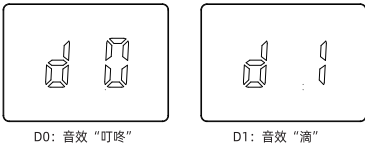


主机	1pcs
USB线	1pcs
电池	3×AA 5号 电池
彩盒	1pcs
说明书	1pcs
保修卡	1pcs


温馨提示

- 1.用户有责任确保设备的电磁兼容环境，以使设备正常工作。
- 2.更改操作环境时，必须让设备静置30分钟以上。
- 3.眼镜和头发会影响红外线。测量时，请摘下眼镜，额头与传感器头对齐。
- 4.在户外使用时，请避免阳光直射。
- 5.远离空调，风扇等。
- 6.为节省电力，机器将在12小时无操作后自动关闭。
- 7.请使用合格、有安全认证的电池，并按照极性正确安装，
电池不合格或装反会导致产品损坏。
- 8.请在电量不足时及时更换新电池。
- 9.寒冷天气请在室内环境使用，请额头靠近测量。


安装方法：

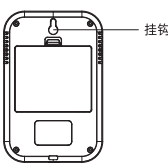

电池安装：
打开电池盖，然后根据电池极性
正确安装新电池。

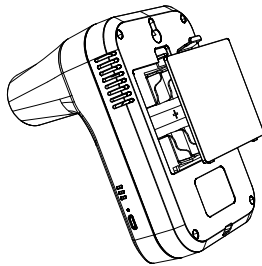

优利德。
优利德科技(中国)股份有限公司
地址：广东省东莞市松山湖园区工业北一路6号
电话：(86-769) 8572 3888
邮编：523 808
<http://www.uni-trend.com.cn>

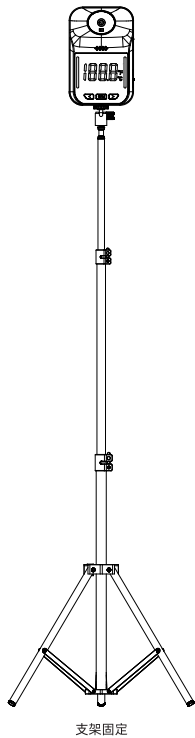

支架固定